

Biokema Pets- ID Standard et Mini

Identification électronique

Transpondeur selon la norme ISO 11784/85.

Produits

- Biokema Pets-ID STANDARD : adapté aux chiens, chats, chevaux et ânes.
- Biokema Pets-ID MINI : adapté aux petits chiens, chats, furets et rongeurs. N'est PAS adapté pour les gros chiens et les chevaux.

Mode d'emploi

1. Vérifiez le code barre et le numéro du transpondeur à l'aide du lecteur
2. Placez la canule dans l'injecteur avec le transpondeur intégré
3. Retirez le capuchon de protection
4. Injectez le transpondeur
5. Vérifiez le numéro du transpondeur à l'aide du lecteur

Biokema Pets-ID STANDARD (taille 2.12 x 13 mm)

- Pour les chiens et les chats l'injection se fait par voie sous-cutanée, du côté gauche du cou dans le tiers supérieur entre l'oreille et l'épaule, direction dorso-ventrale.
- Pour les chevaux et les ânes l'injection intramusculaire aura lieu au tiers médian de l'encolure gauche, 4-5 cm sous la crinière (correspondant au niveau du ligament nuchal).

Chez les animaux jeunes ou agités, une anesthésie locale est conseillée.

Biokema Pets-ID MINI (taille 1.41 x 9 mm)

- Pour les chiens, les chats et les furets l'injection se fait par voie sous-cutanée, du côté gauche du cou dans le tiers supérieur entre l'oreille et l'épaule, direction dorso-ventrale.
- Pour les rongeurs (hamsters, cochons d'Inde, etc.), l'injection sera sous-cutanée entre les omoplates.

Présentation par produit

12 transpondeurs et 1 seringue d'injection

- Transpondeur stérile avec aiguille
- Emballage individuel
- ISO FDX-B Standard/Code du fabricant 972

Fabricant

Datamars Ibérica S.L.U.